

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Unser Bestseller – jetzt nachhaltig.

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Effektiv und schonend wie immer –
die neuen Bacillol® 30 Sensitive
Green Tissues



Gleiche
Leistung –
jetzt mit
nachhaltigen
Tüchern

Bewährte Leistung der Bacillol® 30 Sensitive Tissues

+ Optimale Wirksamkeit

- Bakterizid und levurozid in 1 Minute
- Wirksam gegen Noroviren in 2 Minuten
- Gute Reinigungsleistung

+ Hohe Materialverträglichkeit

- Für empfindliche Oberflächen
- Für Displays, Tastaturen, Handys, Tablets
- Für empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte geeignet

+ Einfach und sicher in der Anwendung

- 1,5 m² Reichweite pro Tuch
- Hautverträglich und allergikerfreundlich – ECARF- & SGS Institut Fresenius-zertifiziert¹
- Ohne Handschuhe anwendbar²

¹ Das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen.

² Wenn Infektionskontrolle und Arbeitsschutzprotokolle es zulassen.

Unser Bestseller – jetzt mit 100 % plastikfreien Tüchern

Die neuen **Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues** sind zu 100 % plastikfrei und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues – Produktvorteile:

-  100 % plastikfreies Tuchmaterial
-  100 % höhere Palettenauslastung³
-  Hergestellt mit Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
-  25 % geringerer CO₂-Fußabdruck als PET-Tücher



³ Gemessen an der Anzahl der Wischtücher im Vergleich zu Bacillol® 30 Sensitive Tissues.

Bacillo!® 30 Sensitive Tissues



Materialschonende Reinigungs-
und Desinfektionstücher
für empfindliche Oberflächen

¹ Bei der Entfernung einer Fett-Staub-Ver-
schmutzung, Prüfbericht WL 4248/23 vom
16.11.2023, „Vergleichende Untersuchung
der Reinigungsleistung zweier gebrauchsfertiger Nassdesinfektionstücher“, wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Unveröffentlichte Studie – Daten verfügbar bei BODE Chemie GmbH.

² Wenn Infektionskontrolle und Arbeitsschutzprotokolle es zulassen.



100 % plastikfreie Tücher –
aus nachwachsenden Rohstoffen



Optimale Wirksamkeit –
schnelle und zeitsparende Anwendung



Materialverträglich –
geeignet für empfindliche Oberflächen



Reichweitenstark –
1,5 m² Reichweite pro Tuch



Gute Reinigungsleistung –
wfk-geprüft¹



Hautverträglich und allergikerfreundlich –
ECARF- & SGS Institut Fresenius-zertifiziert,
kann ohne Handschuhe verwendet werden²

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



- + 100 % plastikfreie Desinfektionstücher**
aus nachwachsenden Rohstoffen
- + Bewährt anwenderfreundlich –**
wirksame, schnelle und materialschonende
Flächendesinfektion



NEU

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	120 Tücher Größe 17 x 20 cm	981 943	18851738	6

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Telefon: +49-7321-36-0
Telefax: +49-7321-36-3636
info@hartmann.info
www.hartmann.info



Erfahren Sie mehr unter:
<https://plhn.de/bzt>

HARTMANN



Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für sensible Oberflächen.



CE 0482

Anwendungsgebiete

Die mit Bacillo[®] 30 Sensitive Foam getränkten gebrauchsfertigen Desinfektionstücher Bacillo[®] 30 Sensitive Green Tissues aus dem Flowpack, benetzen die Flächen hervorragend und wirken schnell, sogar auf empfindlichen Oberflächen.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Produkteigenschaften

- 100 % plastikfreie Tücher
- Frei von Mikroplastik
- Schnell wirksam mit guten Reinigungseigenschaften
- Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon
- Ohne Handschuhe anwendbar*
- Hautverträglich & allergikerfreundlich – SGS Institut Fresenius** & ECARF-zertifiziert



Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

** Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Anwendung

Oberflächen mit den Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

Haltbarkeit nach Anbruch

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

Zusammensetzung

Wirkstoffe der Tränklösung:
Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g

Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillo® 30 Sensitive Foam:
Flammpunkt (DIN EN ISO 3679) 30 °C
Dichte (20 °C) ca. 0,95 g/cm³
pH-Wert (20 °C): ca. 8

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 - 111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	120 Tücher Größe 17 x 20 cm	981 943	18851738	6
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues Big Pack	160 Tücher Größe 18 x 20 cm	981 983	19262139	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	-	10

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE